


もっと健康なくらし

貼付部位図(参考例)

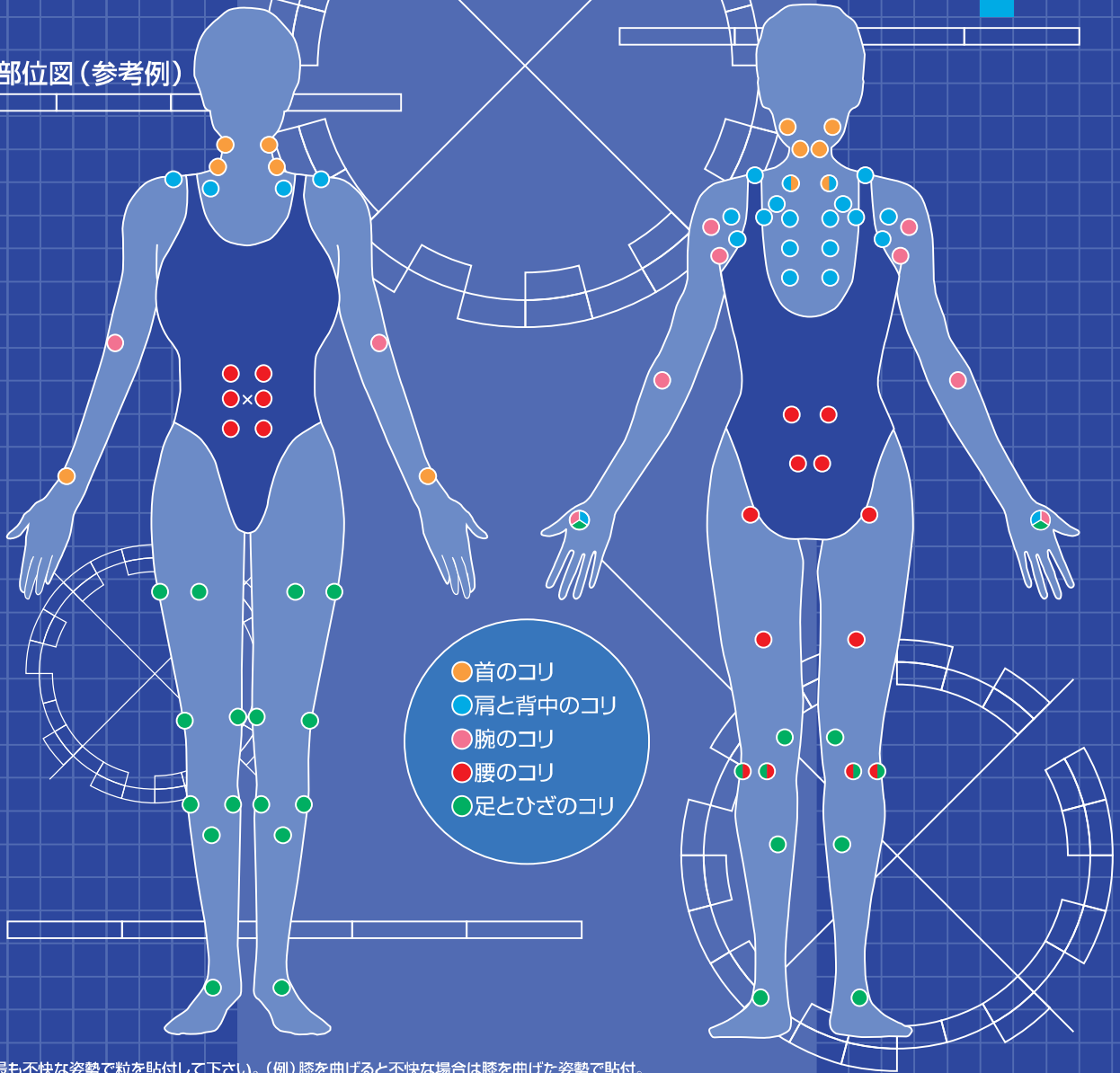

- 首のコリ
- 肩と背中のコリ
- 腕のコリ
- 腰のコリ
- 足とひざのコリ

※最も不快な姿勢で粒を貼付して下さい。(例)膝を曲げると不快な場合は膝を曲げた姿勢で貼付。

器具機械(80) はり又はきゅう用器具 一般医療機器 家庭用貼付型接触粒 医療機器届出番号 22B3X00016

効能・効果 ●装着部位におけるコリの緩解

使用方法 ●首、肩、腰、その他のコリのある部位に必要な応じてご使用ください。●貼ったままの入浴はできませんが、かぶれ予防のために2~3日毎に貼付け場所を変えてください。●本品の粒は何度でも使用可能です。粒はご使用後もお捨てにならず、紛失ならぬよう大切に保管してください。

使用上の注意 ●貼付け場所の汗や汚れなどは、かぶれの原因になりますので、必ずタオルなどで清潔にしてからご使用ください。●特に皮膚の敏感な方は、貼付け場所を予めアルコールで拭いて汗、汚れを除くことで“かぶれ”の予防となります。●万一、カコミが生じた場合は貼付け場所をずらしてご使用ください。●切り傷、打ち身、捻挫その他による出血時は使用しないでください。●高血圧、心臓、肝臓に障害のある方、脳障害のある方は専門医にご相談ください。●骨折、やけど、筋肉の組織破壊などに対しては使用しないでください。●妊婦及び障害をおもちの方は、専門医にご相談の上ご使用ください。●痛みを感じる場所、又は不快感を持っている場所、コリの特に強い場所にもお貼りください。●お子様の手の届かないところに保管してください。ゲルマニウム粒を飲み込まないよう気をつけてください。●テープの一部に天然ゴムを使用しています。天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー症状をまれに起こすことがあります。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。●粒に強い衝撃を与えると破損する場合がありますのでご注意下さい。

貯蔵・保管 ●室温保存(直射日光を避け、小児の手の届かないところに保管してください。)

包装 ●ゲルマニウム10粒入り(99.9%以上含有φ7mm) ●替テープ10枚×10シート入(φ22mm)

株式会社

製造販売業者

日本ゲルマニウム研究所